

## **BAUSCH + LOMB**

### **Renu® solução multiuso**

#### **fresh**

Desinfeta, Limpa, Enxágua, Armazena, Lubrifica e Remove Proteínas Diariamente.

Todos os Passos em Um Único Frasco

**INSTRUÇÕES DE USO:** Para limpar, desinfetar e remover proteínas diariamente siga os seguintes passos indicados abaixo.

**Este regime diário é recomendado pela Bausch + Lomb para o uso saudável e confortável de lentes de contato.**

**1° PASSO:** Colocar 3 gotas de **renu® fresh solução multiuso** em cada um dos lados da superfície da lente e friccionar levemente por 20 segundos.

**2° PASSO:** Enxaguar cada lado da lente por 5 segundos com **renu® fresh solução multiuso**.

**3° PASSO:** Colocar as lentes no estojo e preencher com **renu® fresh solução multiuso**. Deixar as lentes mergulhadas na solução por no mínimo 4 horas. Lembre-se de usar sempre solução nova. Nunca reutilize a solução.

Sempre siga as instruções de seu oftalmologista. Dependendo da composição química da sua lágrima e de seu regime de uso das lentes, o oftalmologista poderá recomendar cuidados ou procedimentos adicionais.

**ARMAZENAMENTO:** Você pode armazenar suas lentes de contato no estojo fechado até o uso, por no máximo 30 dias.

**COMPOSIÇÃO:** Solução isotônica estéril contendo HYDRANATE® (hidroxialquilfosfonato) 0,03%, ácido bórico, edetato dissódico, poloxamina 1%, borato de sódio e cloreto de sódio; DYMED™ (poliaminopropil biguanida) 0,0001%.

**AÇÃO DO PRODUTO:** Limpa, solta e remove acúmulo de proteínas e outros depósitos da superfície das lentes de contato gelatinosas, incluindo as de silicone hidrogel. A remoção de proteínas é mais eficaz quando a solução é utilizada diariamente. Elimina microrganismos prejudiciais da superfície da lente. Enxágua, conserva e umedece as lentes antes do uso.

Formulado para uso na desinfecção e conservação de lentes por até 30 dias.

**INDICAÇÕES DE USO:** **renu® fresh solução multiuso** é indicado para a limpeza diária, remoção de depósitos de proteínas, enxágua, desinfecção química (sem aquecimento) e armazenamento de todas as lentes de contato gelatinosas, incluindo as de silicone hidrogel, como recomendado por seu oftalmologista.

**CONTRAINDICAÇÕES:** O produto é contraindicado nos casos de sensibilidade a qualquer componente da fórmula.

**Problemas com as lentes de contato e com produtos para cuidar das lentes podem resultar em sérios problemas oculares.**

É essencial que você siga adequadamente as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções de uso das lentes de contato, produtos para lentes, incluindo o estojo para armazenamento das mesmas. Problemas oculares, incluindo úlceras na córnea, podem se desenvolver rapidamente e levar à perda da visão. Lentes de uso diário não são indicadas para o uso durante a noite e não devem ser usadas durante o sono. Estudos clínicos têm demonstrado que o risco de reações adversas graves é maior quando essas lentes são usadas durante a noite.

Lentes de uso prolongado devem ser removidas periodicamente para limpeza e desinfecção ou para eliminação e substituição, conforme prescrito pelo seu oftalmologista. Estudos clínicos têm demonstrado que existe um aumento da incidência de reações adversas sérias em usuários de lentes de contato de uso prolongado em relação aos usuários de lentes de contato de uso diário. Estudos também têm mostrado que o risco de reações adversas graves aumenta com o tempo em que as lentes de uso prolongado são usadas antes da remoção para limpeza e desinfecção ou eliminação e substituição. Estudos também têm mostrado que os fumantes têm uma maior incidência de reações adversas. Se você sentir desconforto ocular, lacrimejamento excessivo, alterações na visão, vermelhidão dos olhos, remova imediatamente as lentes e procure o seu oftalmologista. É recomendado aos usuários de lentes de contato consultar um oftalmologista duas vezes por ano, ou mais, conforme necessidade. O estojo das lentes deve ser preenchido com solução nova cada vez que você armazenar suas lentes, e nunca preenchido até transbordar ou com solução reutilizada. Deve-se descartar a solução imediatamente após retirar as lentes do estojo. Não armazenar ou expor suas lentes ou lavar o estojo de lentes com a água da torneira, engarrafada ou destilada, ou com qualquer solução não-estéril. Lave e enxágua o estojo de lentes com **renu® fresh solução multiuso** e deixe secar sob ar fresco toda vez que remover as lentes. Para facilitar a secagem, você pode virar seu estojo de lentes durante a secagem, evitando o acúmulo de solução. Substitua seu estojo de lentes mensalmente. **Advertências: Descartar a solução do estojo das lentes após cada utilização e não utilizar água para cuidar de suas lentes. Caso contrário poderá ocorrer contaminação, resultando em lesões oculares e potencial perda da visão.**

**Informações importantes para segurança:**

- Siga sempre as instruções de uso do produto. Falhas ao seguir as instruções de uso do produto podem levar à perda da visão.
- Visite seu oftalmologista regularmente.
- Sempre lave e seque as mãos antes de manusear suas lentes.
- Não utilize água da torneira, água engarrafada ou saliva com as lentes ou estojo de lentes.
- Utilizar somente a solução nova para limpar e desinfetar as lentes de contato.

- Sempre descartar qualquer solução remanescente no estojo das lentes após cada ciclo de desinfecção.
- Solução salina não desinfeta suas lentes.
- Substitua sempre as suas soluções, lentes e estojo de lentes conforme recomendado.
- Para evitar contaminação, não toque na ponta do frasco em qualquer superfície. Recoloque a tampa após o uso.
- Não use calor (energia térmica) para desinfecção.

#### **Precauções**

- Sempre descarte a solução do estojo das lentes após cada uso.
- Feche bem o frasco após o uso.
- Usar antes da data de validade impressa no cartucho e no frasco.
- Descartar qualquer solução remanescente 90 dias após a abertura do frasco.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Armazenar a solução a temperatura ambiente (15°C - 30°C).

**REAÇÕES ADVERSAS:** Os seguintes problemas podem ocorrer: dor aguda no olho, coceira ou queimação (irritação), conforto menor do que quando a lente foi utilizada pela primeira vez, sensação de algo no olho (corpo estranho, área riscada), umidade excessiva (lacrimejamento) dos olhos, secreções oculares anormais, vermelhidão, redução da nitidez da visão (pobre acuidade visual), visão borrada, halos ou arco-íris em torno dos objetos, sensibilidade à luz (fotofobia), ou olhos secos.

Se você apresentar qualquer sintoma descrito acima:

#### **REMOVA IMEDIATAMENTE SUAS LENTES.**

- Caso o desconforto ou problema apresentado parar, observe de perto as lentes.
- Se estas, de alguma forma apresentarem algum dano, NÃO as coloque novamente nos olhos. Guarde-as no estojo e procure seu oftalmologista.
- Caso a lente esteja suja, apresente um cílio ou outro corpo estranho, ou se o problema parar e a lente aparentar estar intacta, limpe-a completamente, lave-a e desinfete-a, e então recoloque-a.
- Se o problema continuar, remova imediatamente as lentes e consulte seu oftalmologista.

Se qualquer um dos sintomas acima ocorrer, uma séria condição pode estar presente, como uma infecção, úlcera de córnea, neovascularização ou irite.

Procure imediatamente seu oftalmologista para identificação do problema, iniciando o tratamento a fim de evitar sérios danos ao olho.

#### **CUIDADOS BÁSICOS COM AS LENTES DE CONTATO:**

- Sempre lave e enxágue as mãos antes de manipular suas lentes.
- Lave, enxágue e desinfete suas lentes toda vez que as remover.
- Sempre manipule as lentes na mesma ordem, direita ou esquerda primeiro, para evitar mistura.
- Após o uso, sempre descarte a solução do estojo e lave com **renu® fresh solução multiuso**, deixando secar em seguida.
- Troque o estojo das lentes mensalmente.

#### **Esterilizado por filtração – Não reprocessar**

**Fabricante legal:** Bausch & Lomb Incorporated - 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 - Estados Unidos

**Local de Fabricação:** Bausch & Lomb Incorporated - 8507 Pelham Road, Greenville, SC 29615-9598 - Estados Unidos

**Importado e Distribuído por:** BL Indústria Ótica Ltda. – Rua Dona Alzira, 139 – Porto Alegre – RS – CEP 91110-010  
CNPJ 27.011.022/0001-03

Registro ANVISA nº: 10196150015 - Farm. Resp.: Patrícia Helena Weber - CRF-RS 11.640

**SAC: 0800 702 6464**

®/™ Indica marcas da Bausch & Lomb Incorporated ou de suas afiliadas.

© Bausch & Lomb Incorporated

(B03791\_RenuFresh\_475mL\_pack\_ca)