

BAUSCH + LOMB

Renu plus® gotas - lubrificante & umidificante

Composição: Solução isotônica estéril, contendo povidona, ácido bórico, cloreto de potássio, borato de sódio, cloreto de sódio; preservada com ácido sórbico 0,1% e edetato dissódico 0,1%.

Indicações: O produto é indicado para lubrificar e umidificar as suas lentes de contato gelatinosas, proporcionando mais conforto e visão clara.

Precauções: É importante seguir as recomendações do seu oftalmologista quanto aos procedimentos para a manutenção e conservação de lentes de contato.

Advertências: O produto é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Armazenar o produto à temperatura ambiente (15°C - 25°C). Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não toque no bico gotejador do frasco, para evitar contaminação. Mantenha o frasco fechado. Não usar após a data de vencimento gravada na embalagem. Descartar a solução 6 meses após a abertura do frasco.

Modo de Usar: Durante o uso das lentes de contato, aplicar duas ou três gotas em cada olho, piscando várias vezes. Se o desconforto persistir, remova as lentes e consulte o seu oftalmologista.

®/™ indicam marcas da Bausch & Lomb Incorporated ou de suas afiliadas.

© Bausch & Lomb Incorporated

Fabricante legal: Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, Estados Unidos

Local de Fabricação: Bausch & Lomb Incorporated, 8507 Pelham Road, Greenville, SC 29615-9598, Estados Unidos

Importado e Distribuído por: BL Indústria Ótica Ltda.

Rua Dona Alzira, 139 - Porto Alegre - RS

CEP: 91110-010 - CNPJ: 27.011.022/0001-03

Farmacêutico Responsável:

Patrícia Helena Weber - CRF-RS 11.640

Reg. ANVISA: 10196150007

SAC: 0800 702 6464

sac@bausch.com

www.bausch.com.br

(B03786_RenuPlus_8mL_ca)